



# UROLOGIE

## KONIX GEL



# Mayumana Healthcare

## Waarom kiezen voor Mayumana Healthcare?

Bij Mayumana Healthcare bieden we een compleet assortiment hoogwaardige medische gels, waaronder de Konix Lido, Lido C en C gels. Deze gels zijn speciaal ontwikkeld om medische specialisten te ondersteunen in uiteenlopende toepassingen, waarbij **comfort**, **effectiviteit** en **veiligheid** centraal staan.

De Konix Lido gel bevat **lidocaïne** voor een lokaal verdovende werking, wat zorgt voor meer comfort tijdens ingrepen. De Konix Lido C biedt daarnaast een extra laag bescherming door de toevoeging van **chloorhexidine**, voor een combinatie van **verdooving** en **antibacteriële** werking. De Konix C gel, zonder lidocaïne, is ideaal voor algemene medische procedures waarbij een soepele en betrouwbare gel vereist is.

Deze gels sluiten naadloos aan bij ons bestaande portfolio, zoals **scopen** en **katheters**, en vormen een essentieel onderdeel van een complete en efficiënte werkomgeving. Met het brede aanbod van Konix gels en onze focus op **kwaliteit** en innovatie ondersteunen we u in het leveren van **optimale zorg** en **patiënttevredenheid**.

### Kwalitatieve producten

Al onze producten zijn zorgvuldig geselecteerd en afkomstig van de beste leveranciers. We kijken niet alleen naar de kwaliteit van het product, ook naar de carbon footprint en toekomstvisie van onze fabrikanten.

### Ondersteuning

Mayumana biedt begeleiding en ondersteuning bij alle trials en testen van producten in ons portfolio, zowel in de beginfase als gedurende het gebruik ervan. Daarnaast spelen we een actieve rol in het trainen van nieuwe collega's in het ziekenhuis.

### Professioneel partnerschap

Met zowel arts, verpleegkundige, manager, medisch-technicus als inkoper onderhouden we nauw contact. We leveren niet alleen producten, maar een totaaloplossing waarin kennis, producten, advies en samenwerking key zijn.

### Uitstekende kennis

Binnen ons team hebben we experts op het gebied van urologie, gynaecologie, neurochirurgie en oncologie. We zorgen ervoor dat al onze collega's voortdurend worden bijgeschoold om hun kennisniveau op peil te houden.

### Snelle en vlekkeloze leveringen

Mayumana houdt een voorraad aan per ziekenhuis, zodat we altijd binnen 24 uur kunnen leveren. Daarnaast zijn we, waar nodig, in staat om spoedzendingen binnen 4 uur door heel Nederland uit te voeren, 7 dagen per week.

### Service


Voor ons is service een mentaliteit. Onze gecertificeerde technici bieden service aan onze apparatuur volgens strikte protocollen. We hebben een minimale responstijd en ons preventief onderhoud zorgt ervoor dat uw apparatuur elke dag optimaal presteert.





# Lido C

**VERDOVEND & ANTISEPTISCH**

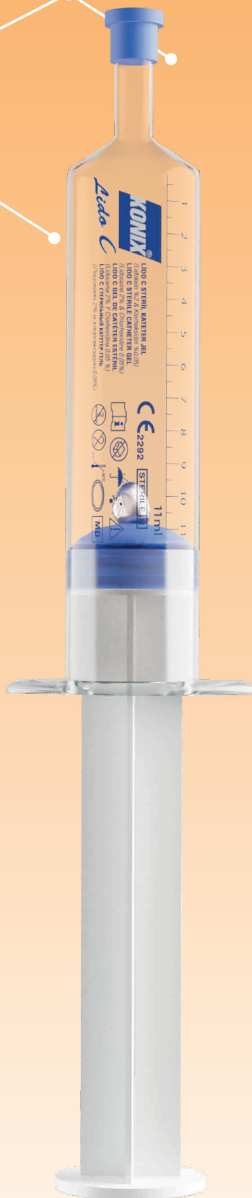

KONIX Lido C Gel is CE gemarkeerd als Class III  
Medical Device Directive 93/42 EEC

**STERIEL**

Konix Lido C Gel is een steriel, transparant, wateroplosbaar glijmiddel die gebruikt kan worden voor het inbrengen van urethrale katheters, cystoscopen en andere medische apparatuur.



## EIGENSCHAPPEN

- Effectieve en langdurige werking
- Verdovend en antiseptisch
- Gemakkelijk aan te brengen
- Ideale viscositeit



## BESTANDSDELEN

- Lidocaïne (verdovend)
- Chloorhexidine Gluconaat (antisepticum)
- Hydroxyethyl Cellulose (lubricatie)
- Gedeïoniseerd water
- Propyl Hydroxybenzoaat (conserveermiddel)
- Methyl Hydroxybenzoaat (conserveermiddel)
- Mono Propyleen Glycol (bevochtigingsmiddel)



## KONIX Lido C

Omdat het:

- een glijmiddel is voor katheters, endoscopen, sondes, buizen of andere medische instrumenten
- het **risico** op urethraal trauma bij het inbrengen van de katheter **vermindert**
- de **kans op infectie vermindert** door wrijving en ongemak te verminderen
- **latexvrij** en **hypoallergeen** is
- helpt bij het **verwijden** van de urethra of doelli-chaamsopening

## Specificaties

Artikelcode	Inhoud (mL)
Y0000.107.0005	6
Y0000.107.0024	11
Y0000.107.0007	12

# Lido

**VERDOVEND**



KONIX Lido Gel is CE gemarkeerd als Class III  
Medical Device Directive 93/42 EEC

**STERIEL**

KONIX Lido Steriele Gel is een steriele, wateroplosbare, niet-irriterende glijmiddelgel met ondersteunende verdovende eigenschappen die wordt gebruikt om het inbrengen van katheters en andere medische instrumenten (zoals cystoscopen) in de urethra en blaas te vergemakkelijken.



## EIGENSCHAPPEN

- Effectieve en langdurige werking
- Verdovend en antiseptisch
- Gemakkelijk aan te brengen
- Ideale viscositeit



## BESTANDSDELEN

- Lidocaïne (verdovend)
- Hydroxyethyl Cellulose (lubrificatie)
- Gedeïoniseerd water
- Propyl Hydroxybenzoaat (conserveermiddel)
- Methyl Hydroxybenzoaat (conserveermiddel)
- Mono Propyleen Glycol (bevochtigingsmiddel)




## KONIX Lido C

Omdat het:

- een glijmiddel is voor katheters, endoscopen, sondes, buizen of andere medische instrumenten
- het **risico** op urethraal trauma bij het inbrengen van de katheter **vermindert**
- de **kans op infectie vermindert** door wrijving en ongemak te verminderen
- **latexvrij** en **hypoallergeen** is
- helpt bij het **verwijden** van de urethra of doelli-chaamsopening

## Specificaties

Artikelcode	Inhoud (mL)
Y0000.107.0020	6
Y0000.107.0019	11
Y0000.107.0021	12

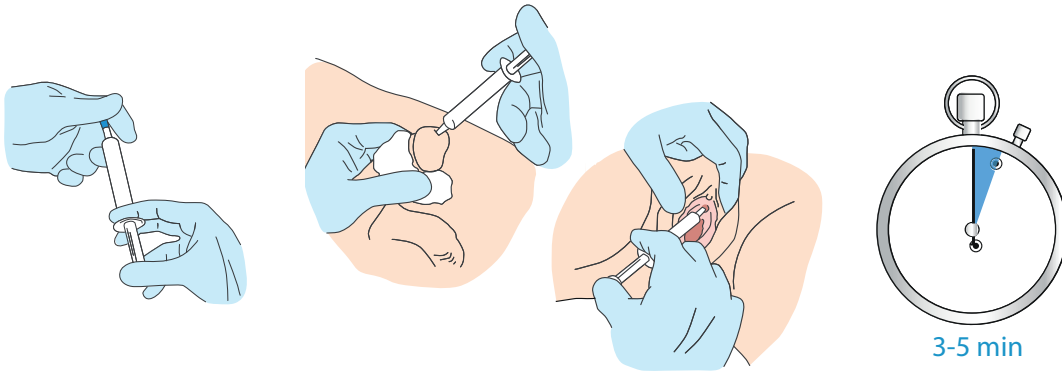

1. Was uw handen en bereid een zo aseptisch mogelijk gebied voor om de procedure uit te voeren. Bereid een schoon dienblad voor en plaats de benodigde materialen.
2. Haal de spuit (6 ml, 11 ml, 12 ml) uit de steriele verpakking door de verpakking open te scheuren. De 6 ml spuit is geschikt voor gebruik bij vrouwen, terwijl de 11 ml en 12 ml spuit geschikt zijn voor gebruik bij mannen.
3. Druk licht op de zuiger voordat u de blauwe dop verwijdert om een gelijkmatigere en zachtere toepassing te garanderen. Voor de accordeonspuit breekt u de applicator af.
4. Breng de conus van de spuit voorzichtig in de urethrale opening en injecteer de gel langzaam door lichte en gelijkmatige druk toe te passen.
5. Breng de resterende gel aan op het oppervlak van de katheter of op het oppervlak van een ander medisch apparaat.
6. KONIX Steriele Gel toont zijn smerende werking zodra de toepassing begint. Het verdovende effect van KONIX Lido C & KONIX Lido begint na 3-5 minuten.
7. Als er meer gel moet worden gebruikt, moeten de conditie van het behandelde weefsel, de leeftijd van de patiënt en eventuele nadelige omstandigheden van de patiënt die verband kunnen houden met gevoeligheid voor Lidocaïne en chloorhexidine door de arts in acht genomen worden.
8. Wanneer het hele product niet wordt gebruikt, moeten de spuit en de resterende gel worden beoordeeld en weggegooid als medisch afval.
9. KONIX Steriele Gels mogen alleen worden gebruikt onder toezicht van gespecialiseerd medisch personeel.

# GEBRUIK

CONTACT



CHOOSE  
YOUR BATTLE



**UROLOGIE**



GYNAECOLOGIE



NEUROCHIRURGIE



ONCOLOGIE

MAYUMANA HEALTHCARE B.V.

Madame Curiestraat 22  
2171 TW Sassenheim

(+31) 252 23 58 00

[WWW.MYH.HEALTH](http://WWW.MYH.HEALTH)

[BESTELLING@MYH.HEALTH](mailto:BESTELLING@MYH.HEALTH)

IBAN: NL06 RABO 03044 58600  
BTW NR: NL851001154B01  
KVK NR: 53748921

OUR ENERGY FLOWS  
**IN MEDTECH**

